

Pflege und Sterilisation von KaVo MULTiflex Turbinen

Die Pflege der MULTiflex Turbinen muss 2x täglich, mittags und abends sowie vor jeder Sterilisation mit KAVOSpray bzw. SPRAYrotor durchgeführt werden. Die Sterilisation erfolgt im Autoklaven bis max. 135 °C.

Zur Minimierung der Infektionsgefahr muss die Pflege der KaVo Aufsatzinstrumente immer mit Schutzhandschuhen durchgeführt werden.

Bohrer entfernen.


Nicht in Desinfektionsbäder legen!

Mindestens 1x wöchentlich zur zusätzlichen Pflege des Spannsystems von vorne mit dem Sprühnippel in das Spannsystem sprühen. Anschließend nachfolgenden Pflegevorgang durchführen.

Zur Reinigung mit QUATROcare werden die Instrumente auf die Pflegekupplung aufgesetzt. Dauer pro Instrument: 20 Sekunden. Instrumente vor der Abnahme zuerst außen gründlich abwischen.


1

2

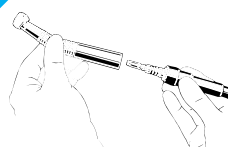


MULTiflex-Turbine von der Motorkupplung abnehmen.

5

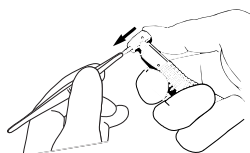


6

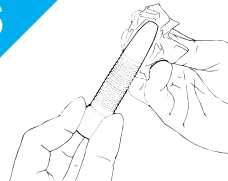

Die Turbinen können äußerlich durch Abbürsten unter fließendem Wasser oder mit einer Alkohollösung gereinigt werden. Die Turbinen nicht in Ultraschall Reinigungsgeräte legen, da sonst Funktionsstörungen auftreten können!

7

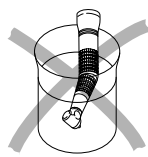


8




Instrumente mit diesem Symbol sind im Thermodesinfektor waschbar. Dies ist nur mit dem Original KaVo Waschständer zulässig. Vor und nach jedem Waschvorgang Pflege.

9

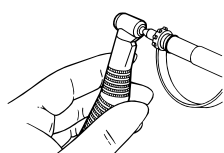


10

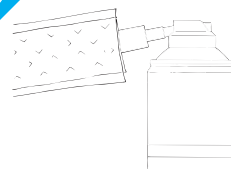


Turbine auf passenden Ansatz des KaVo Pflegemittels aufsetzen und durchsprühen. Wir empfehlen, original KaVo Pflegemittel zu verwenden! Bei starkem Schmutzaustritt Pflegevorgang wiederholen.

11

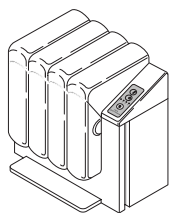


14

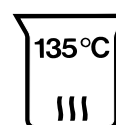

MULTiflex Turbinen offen oder in Sterilisationstüten bis max. 135 °C im Autoklaven oder im Schnellsterilisator sterilisieren. Nach der Sterilisation Instrumente sofort aus dem Sterilisator entnehmen.

Hinweis

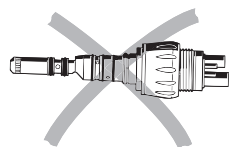

Die MULTiflex Kupplung ist nicht sterilisierbar.

Vor Inbetriebnahme Instrument auf Motor aufsetzen, mehrere Sekunden laufen lassen und eventuell austretendes Öl abwischen.

Die Handhabungs- und Wartungshinweise entnehmen Sie bitte der jedem Produkt in der Verpackung beigelegten Gebrauchsanweisung.



KaVo. Dental Excellence.

D-88400 Biberach/Riss
Telefon +49 0 73 51 56-0 · Fax +49 0 73 51 56-14 88
Internet: www.kavo.com