

Pflege und Sterilisation von KaVo Chirurgie Hand- und Winkelstücken

Die Reinigung und Pflege der Chirurgie Instrumente muß unmittelbar nach jeder Anwendung bzw. vor jeder Sterilisation entsprechend den folgenden Schritten durchgeführt werden.


Zur Minimierung der Infektionsgefahr muß die Pflege der KaVo Aufsatzinstrumente immer mit Schutzhandschuhen durchgeführt werden.

1

2


Bitte die aufgeführten Reinigungsschritte korrekt durchführen. Dadurch wird verhindert, daß Blut-, Speichel- oder Kochsalzrückstände antrocknen und Funktionsstörungen auftreten.

Instrument von der Motorkupplung abnehmen.

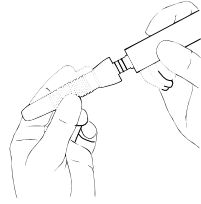

3

4

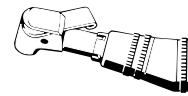


Bohrer entfernen

Äußerlich durch Abbürsten unter fließendem Wasser oder mit einer Alkohollösung reinigen.


5

6

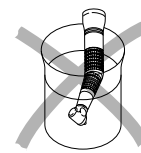


Nicht in Desinfektionsmittel legen oder tauchen!

INTRA-Köpfe zur nachfolgenden Pflege vom Unterteil abnehmen.

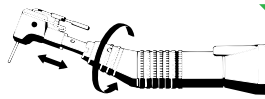


7

8

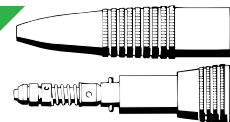


Verschiedene Instrumente sind für die Reinigung und Pflege zerlegbar.

Zerlegte Instrumente unter fließendem, kaltem Wasser gründlich reinigen bzw. abbürsten und anschließend trocknen. Instrumente wieder zusammensetzen.

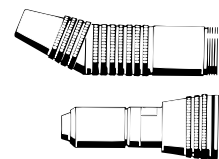


9

10

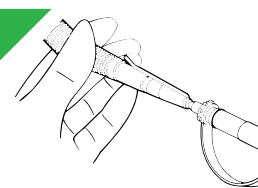


Mindestens 1x wöchentlich zur zusätzlichen Pflege des Spannsystems von vorne mit dem Sprühnippel in das Spannsystem sprühen. Anschließend nachfolgenden Pflegevorgang durchführen.

INTRA Kopf in den passenden Ansatz des KaVo Pflegemittels einsetzen und intensiv durchsprühen. Andere Pflegemittel sind nicht zulässig! Bei starkem Schmutzaustritt Pflegevorgang wiederholen.

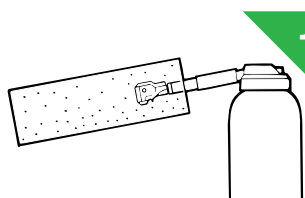


11

12

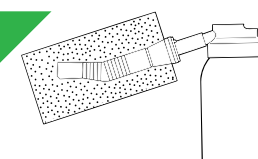

Chirurgie Instrument auf passenden Ansatz des KaVo Pflegemittels aufsetzen und intensiv durchsprühen. Andere Pflegemittel sind nicht zulässig! Bei starkem Schmutzaustritt Pflegevorgang wiederholen.

Chirurgie Instrumente offen oder in Sterilisationstüten bis max. 135 °C im Autoklaven oder im Schnellsterilisator sterilisieren. Nach der Sterilisation Instrumente sofort aus dem Sterilisator entnehmen.

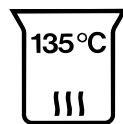

13

14




Instrumente mit diesem Symbol sind im Thermodesinfektor waschbar. Dies ist nur mit dem Original KaVo Waschständer zulässig. Vor und nach jedem Waschvorgang Pflege.

Vor Inbetriebnahme Instrument auf Kupplung aufsetzen, mehrere Sekunden laufen lassen und eventuell austretendes Öl abwischen.

15

16

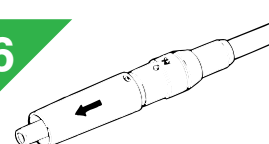

Überschüssiges Pflegemittel kann in den Motor eindringen und die Funktion beeinträchtigen. 1x täglich Motorhülse abnehmen und Motorgehäuse mit einem trockenen Tuch abwischen.

Die Handhabungs- und Wartungshinweise entnehmen Sie bitte der jedem Produkt in der Verpackung beigelegten Gebrauchs-, Wartungs- und Montageanweisung.

